

心电记录仪:快速操作指南-ER6

恭喜您拥有了一款便捷的心健康管理工具!请花一分钟阅读本指南,轻松开始您的心电监测。


一. 使用前准备

- 1.设备充电:使用前,请连接USB充电线为设备充满电。(绿灯闪烁表示充电中,绿灯常亮表示充满电)
- 2.下载App:使用手机扫描包装盒二维码或前往应用商店搜索“Yomkerhealth”下载并安装官方应用程序。工作中确保您的智能手机蓝牙、地理位置、网络处于开启。

二、4步极简操作

- 1.左腿测试部位无过多毛发、油脂或汗水。如有必要可用清水擦拭清洁皮肤
- 2.打开应用程序按照App界面提示绑定设备,您可以在APP内查看实时波形、历史记录等数据。
- 3.左手食指/拇指按压在标识有“L”的金属电极片上,右手食指/拇指按压在标识有“R”的金属电极片上,ECG底部金属电极片同左腿脚踝或膝盖处,倒计时3秒后开始测试。

如图所示

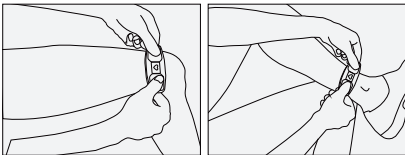

三. 注意事项

测量环境:测量时请远离强电磁干扰源(如运行的微波炉、手机基站附近)。

数据解读:【重要提示】本设备生成的心电数据仅供参考和健康追踪,不能作为临床医学诊断的唯一依据。如有任何异常提示或身体不适,请务必咨询专业医生。

存:产品应存放于阴凉干燥处,避免高温、潮湿、和直接日照。

不适用:请勿将心电记录仪粘贴在有疤痕、伤口的位置以及带起搏器设备同时使用。



ER6操作视频